



Seringue BD Preset™ Eclipse™ Remplissage par **précalibrage** (1,6 ml recommandé)


Précalibrage
à 1,6 ml

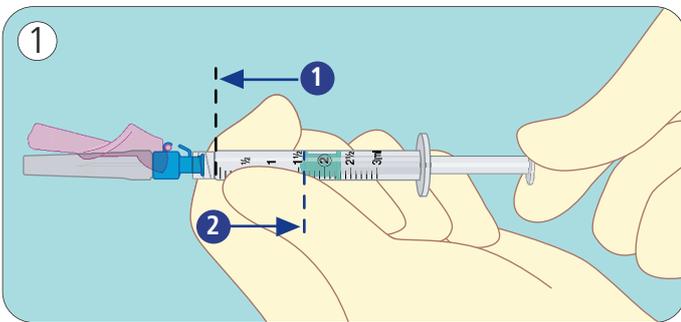


Pousser le piston à fond **1**,
et l'ajuster au volume de sang à recueillir **2** (1.6 ml recommandé).

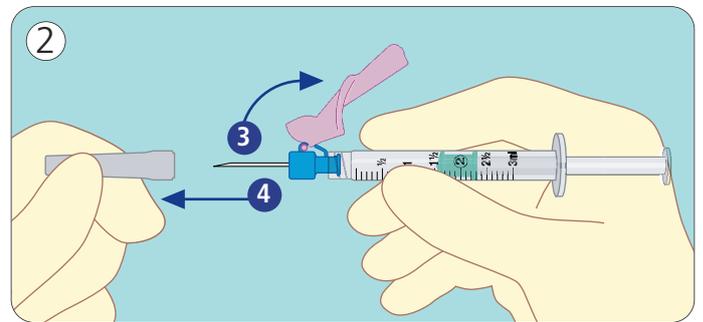


Repousser la gaine protectrice rose vers l'arrière **3**
et ôter le capuchon protecteur de l'aiguille **4**.

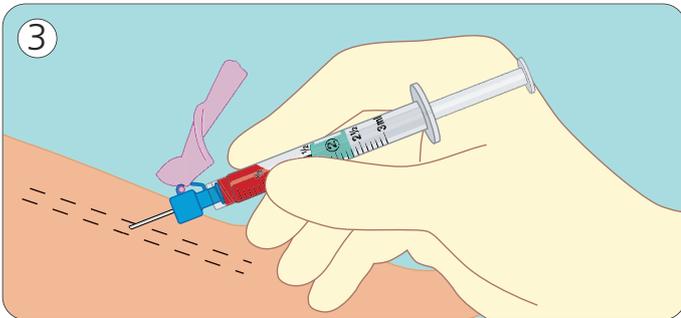


Réaliser la ponction artérielle.
La seringue se remplit automatiquement jusqu'au piston, au volume
que vous avez sélectionné (1.6ml).

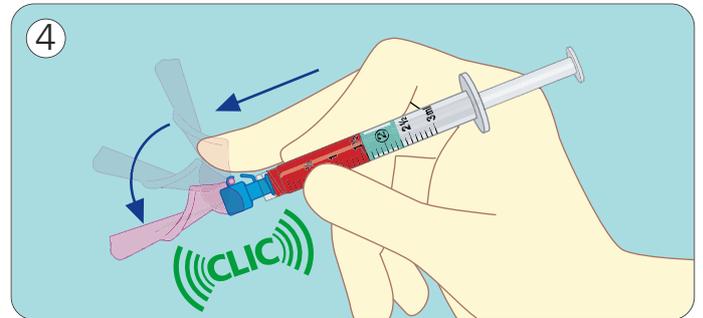

Dépiquer et repousser immédiatement la gaine protectrice rose, avec le pouce
ou le majeur, jusqu'à entendre un **clac**. L'opération s'effectue avec une
main ; de l'autre main, comprimer fermement le site de ponction.

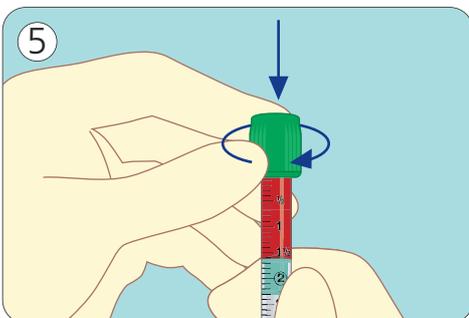

Éliminer l'aiguille et fixer le bouchon sur la seringue
en la vissant/poussant. Identifier l'échantillon.

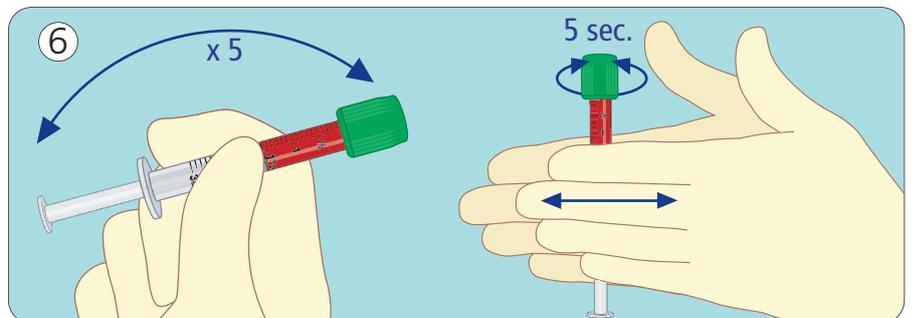

Homogénéiser l'échantillon par 5 retournements lents, puis faire rouler la seringue entre les mains
pendant 5 secondes.