


Prélèvement sur ligne




Remplissage à 1,6 ml




Remplissage par aspiration

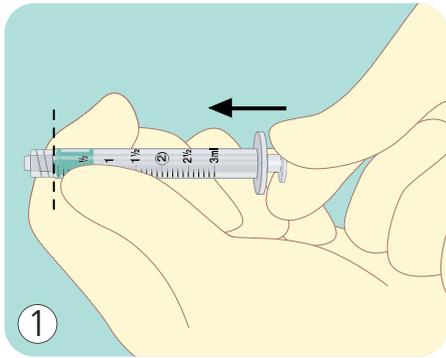


IMPORTANT : Pousser le piston à fond.

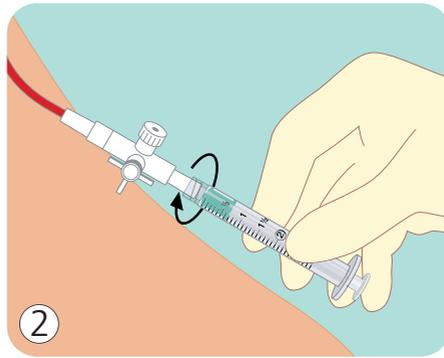


Connecter la seringue à l'embout Luer.

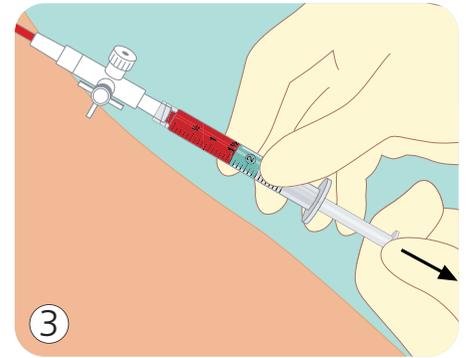


Remplir la seringue jusqu'au volume recommandé (1,6 ml).

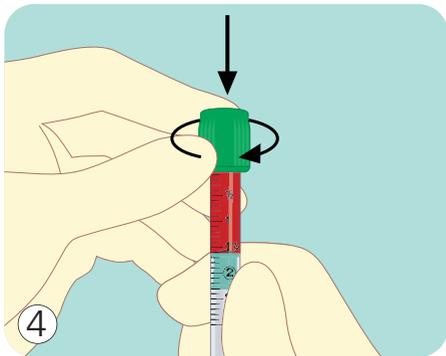

Déconnecter et visser/pousser le bouchon vert sur la seringue. Identifier l'échantillon.

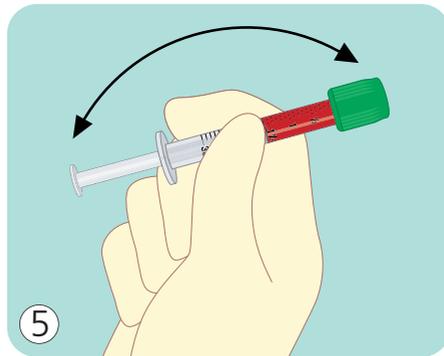

Homogénéiser l'échantillon par 5 retournements lents...

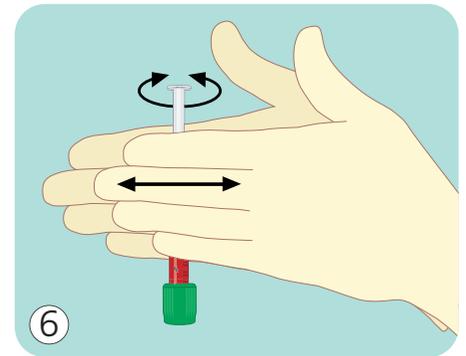

...puis faire rouler la seringue entre les mains pendant 5 secondes.

Réf	Descriptif	Volume total	Volume recommandé	Conditionnement
364316	Seringue à cône Luer-Lok™	3,0 ml	1,6 ml	Carton de 100 unités